

Sistema de transporte, conservación y concentración de parásitos  
*Parasite transport, preservation and concentration system*

## Indicaciones / Indications

- **Lavar las manos con jabón antes y después de la recogida.**
- Utilizar antes de la fecha indicada en el envase.
- Conservar a temperatura ambiente.
- Evitar el uso de medicamentos antidiarreicos o laxantes antes de la recogida.
- Para asegurar la máxima recuperación de parásitos, se recomienda la recogida de 3 muestras en días alternos en diferentes recipientes.
- **En aquellos casos en los que hay un tubo vacío este debe utilizarse en último lugar, no debiendo pasar más de 24h hasta que la muestra llega al laboratorio.**
- **Wash hands with soap before and after sample collection.**
- Use before the date indicated on the package.
- Store at room temperature.
- Avoid the use of anti-diarrhoeal medication or laxatives prior to collection.
- To ensure maximum parasite recovery, collection of 3 samples on alternate days in different containers is recommended.
- **If there is an empty tube, this should be used last, and no more than 24 hours should elapse before the sample reaches the laboratory.**

## Recolección de la muestra / Sample collection

- 1 Defeque en una superficie limpia y seca, **evitando que las heces se contaminen con orina o agua.** Puede tomar la muestra desde el inodoro colocando previamente una revista o papel film.

En niños que usen pañal, las heces pueden recogerse directamente de este.

*Defecate on a clean, dry surface, **avoiding contamination of faeces with urine or water.** You can collect the sample from the toilet by placing a sheet or cling film.*




*In children wearing a nappy, faeces can be collected directly from it.*

- 2 Abra el tubo, y con la ayuda del tapón recoja una cucharada de muestra. Introduzca la muestra en el tubo.

*Open the tube and collect the amount of sample corresponding to one tablespoonful. Place the sample in the tube.*

- 3 Cerrar firmemente, agitar durante 30 segundos y conservar la muestra a temperatura ambiente en **posición vertical.**

*Close tightly, shake for 30 seconds and store the sample at room temperature in an **upright position.***

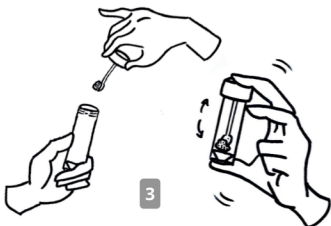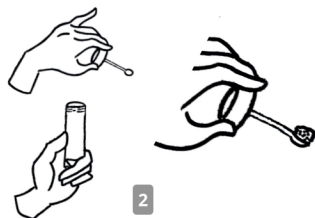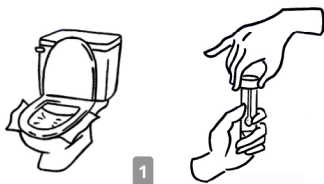

## Precauciones / Cautions

- El contenido del tubo es **TÓXICO ¡NO BEBER!** Puede contener líquido con formaldehído.
- En caso de ingestión consultar urgentemente al médico.
- Evitar contacto con la piel y ojos, en caso de contacto lavar con agua abundante.
- Mantener fuera del alcance de los niños. USO NO DOMÉSTICO.
- *The content of tube is **TOXIC, DO NOT DRINK!** May contain liquid with formaldehyde.*
- *If swallowed, seek medical advice as a matter of urgency.*
- *Avoid contact with skin and eyes, in case of contact wash with plenty of water.*
- *Keep out of reach of children. NON DOMESTIC USE.*